

DIMAR

PRODUCT LINE

Ambulance
Emergency
& Hospital Departments

DimAir Line



EASY VENT MASK

**PEEP Regolabile
con Filtro Antimicrobico >99%**

MASCHERA EASY VENT


- Maschera "Easy Vent" per la somministrazione di miscele aria/ossigeno in tecniche di CPAP
- Sistema Venturi in grado di erogare:
 - Flussi > 120 Lt/min
 - FiO₂ variabile da 0,30 a 1 (30% ÷ 100%)
- Kit leggero, pratico e di rapido impiego, può essere usato in Ambulanza, Pronto Soccorso e nei reparti di degenza ospedaliera, in presenza di una sola fonte di ossigeno quale impianto di distribuzione o bombola

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Monopaziente.
- Venturi integrato ad alta efficienza.
- Maschera con cuscinetto anatomico gonfiabile.
- **Valvola PEEP regolabile da 0 a 20 cmH₂O senza soluzione di continuità con filtro antimicrobico certificato**
- FiO₂ somministrabile da 0,30 a 1 (30% ÷ 100%).
- Manometro integrato per il costante controllo e regolazione della pressione applicata.
- Raccordo Luer per la somministrazione di ossigeno o controllo della EtCO₂.
- Tubi alimentazione ossigeno raccordabili al singolo o doppio flussimetro o a bombola di O₂.
- Nucale in silicone a rapida applicazione e fissaggio.
- Latex e DEHP Free.

VANTAGGI

- Dispositivo Pratico, Efficace e di Rapido posizionamento.
- Monitoraggio continuo della pressione applicata anche in presenza di perdite.
- L'efficacia del sistema consente la somministrazione di pressioni fino a 20 cmH₂O.
- Ridotto consumo di ossigeno per una maggior autonomia della bombola.
- Funziona con il solo ossigeno degli impianti di distribuzione o bombole.
- Possibilità di somministrare aerosol tramite apposito KIT (Ref. 700/5066).

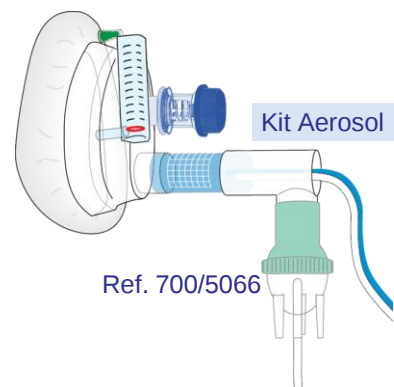

CODICE	MISURA	RDM	CND/EMDN
700/7111	PED/ADULTI (S/M)	2683358	R0301010202
700/7112	ADULTI (L)		
700/7113	ADULTI (XL)		

TABELLA RENDIMENTI

Flusso / Pressioni / FiO₂ Flusso ottenuto 60 Lt circa

Conc. O ₂ % approx.	35%	40%	50%	60%
FLUSSI O ₂ Lt/min.	A	A + B	A + B	A + B
PEEP cm H ₂ O	5	5	7 10	6 18
	10	8	9 8	8 16
	15	10	11 6	10 14
FLUSSO OTTENUTO approx.	60 Lt/min.			

- In confezione Singola
- Confezione multipla da 10 pezzi
- Possibilità di realizzare modelli, versioni e confezionamenti personalizzati e su specifica richiesta.



HMC Premedical S.p.A

Via Bosco 1/3 – 41037 Mirandola – MO – I
Tel: +39 0535 22704 Fax: +39 0535 609546



0425