

GFitTM

Dispositivi per Gastrostomia

La nostra visione è fornire dispositivi per la nutrizione pratici, sicuri e confortevoli sia per adulti che per bambini.



Introduzione alla nutrizione tramite sonda di ricambio per gastrostomia percutanea

La gastrostomia è un tramite stomale che fornisce accesso diretto allo stomaco, consentendo il supporto nutrizionale bypassando il primo tratto dell'apparato gastrointestinale (bocca ed esofago)

La procedura è necessaria quando un paziente richiede un supporto nutrizionale a lungo termine.

Le gastrostomie possono essere confezionate chirurgicamente o utilizzando una tecnica percutanea. I kit iniziali vengono utilizzati per creare la stomia e posizionare il primo dispositivo di nutrizione. Quando la stomia è stabilizzata, possono essere utilizzati dispositivi di sostituzione.


La gastrostomia è indicata nei pazienti che presentano difficoltà di nutrizione. Queste possono essere dovute a patologie neurologiche,

patologie gastrointestinali o difficoltà di deglutizione. Poiché le gastrostomie sono nascoste sotto gli indumenti, non ostacolano le attività o la vita quotidiana del paziente.

Medicina Product Line include una gamma di prodotti per gastrostomia di alta qualità.

Ogni componente del prodotto è stato attentamente considerato tenendo conto della salute e del benessere del paziente. La nostra visione è fornire dispositivi per la nutrizione pratici, sicuri e confortevoli sia per adulti che per bambini.

“Ogni componente del prodotto è stato attentamente considerato tenendo conto della salute e del benessere del paziente.”

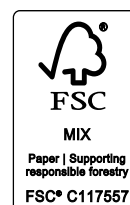

Sonda per Gastrostomia

Una sonda per gastrostomia è un dispositivo medico per nutrizione che consente l'accesso diretto allo stomaco dopo che il tramite iniziale è stato stabilizzato.

Una sonda è fissata mediante un palloncino interno e un disco cutaneo esterno, consentendo il posizionamento in regime ambulatoriale o domiciliare.

Forniamo sonde per gastrostomia nelle misure 12/14/16/18/20/22/24 Fr.

Sono realizzati in silicone medicale di alta qualità.

Ogni sonda è dotata di una via di gonfiaggio codificata a colori per indicare la misura French (Fr), consentendo una rapida identificazione. A ciascuna sonda per gastrostomia è collegato un connettore ENFit fisso.

Le sonde per gastrostomia sono disponibili con connettori ENFit a una o due vie. Il connettore ENFit consente alle sonde per gastrostomia di essere conformi ai dispositivi per nutrizione enterale (ISO 80369-3).



Tabella di raccomandazione per il riempimento del palloncino della sonda per gastrostomia

Sonda Gastrostomia (Fr)	Minimo (ml)	Consigliato (ml)	Massimo (ml)
12	3	4	5
14	3	4	5
16	10	10	20
18	10	10	20
20	10	10	20
22	10	10	20
24	10	10	20

Fare riferimento a pagina 13 per le misure delle sonde per gastrostomia e i codici prodotto.

“Realizzato in silicone medicale di alta qualità”

Il volume del palloncino deve essere controllato settimanalmente per garantire che la sonda per gastrostomia sia sempre fisso in modo sicuro.



Caratteristiche principali del dispositivo

La sonda per gastrostomia offre eccellenti caratteristiche per la sicurezza del paziente, il comfort e la facilità d'uso per il paziente o per l'operatore sanitario.

Connettori rotanti innovativi che consentono un facile collegamento e scollegamento senza torsione della sonda per gastrostomia. Disponibili in versione a una o due vie.

Massimo comfort per il paziente grazie al silicone medico morbido e flessibile di alta qualità.

Clamp laterale che controlla il flusso di nutrizione e farmaci, garantendo l'assenza di reflusso del contenuto gastrico.

Marcature di distanza ogni 1 cm.

Linea radiopaca lungo il corpo della sonda.

Elevata stabilità del palloncino di ritenzione interno per un utilizzo prolungato e un fissaggio sicuro.



Via di gonfiaggio per il riempimento del palloncino. La misura French e il volume di riempimento sono marcati sulla valvola.

Placca di fissaggio a 90° per un fissaggio sicuro e discreto. La struttura della placca di ritenzione garantisce una circolazione dell'aria superiore a livello dello stoma senza creare pressione.

Palloncino a forma di mela che garantisce una buona tenuta e riduce le perdite dal tramite.

Punta retratta per prevenire traumi una volta che il palloncino è stato gonfiato.

GFit™



Bottoni per Gastrostomia

Un bottone per gastrostomia è una sonda inserita attraverso la parete addominale direttamente nello stomaco, consentendo il libero passaggio di alimenti e acqua.

Il bottone è normalmente indicato per i pazienti che richiedono un supporto nutrizionale a lungo termine. Il tramite per gastrostomia viene generalmente creato utilizzando inizialmente una sonda PEG e successivamente il bottone viene posizionato nel tramite stabilizzato.

Il bottone offre vantaggi pratici ed estetici per il paziente. Offriamo una gamma di misure per adulti e bambini per adattarsi alle esigenze individuali e garantire una vestibilità perfetta. Grazie al profilo basso e alle dimensioni ridotte, il bottone consente agli adulti di proseguire le normali attività quotidiane con il minimo ingombro possibile. Consente inoltre al

bambino in crescita la libertà di gattonare e giocare senza l'ingombro di un dispositivo più grande.

Il bottone è realizzato in silicone medicale di alta qualità ed è confezionato con accessori pratici. Un introduttore per facilitare l'inserimento e una siringa da 10 ml per il gonfiaggio del palloncino di ritenzione garantiscono un posizionamento rapido ed efficace.

È disponibile anche un kit completo che fornisce tutti gli articoli necessari per l'operatore sanitario (fare riferimento a pagina 7).

Tabella di raccomandazione per il riempimento del palloncino del bottone per gastrostomia


Bottone per gastrostomia (Fr)	Consigliato (ml)
12	2
14	2
16	3.5
18	3.5
20	5
24	5

Il volume del palloncino deve essere controllato settimanalmente per garantire che il bottone per gastrostomia sia sempre fisso in modo sicuro.

Abbiamo scelto di ridurre il volume di gonfiaggio dei palloncini. Volumi più piccoli riducono lo stress sul palloncino, con conseguente riduzione delle deformazioni e delle rotture. Di conseguenza, sono necessarie meno sostituzioni, con minore trauma per il paziente.

“Il bottone offre vantaggi pratici ed estetici per il paziente.”

Confronto dei volumi del palloncino su dispositivi 14 Fr rispetto alla concorrenza.

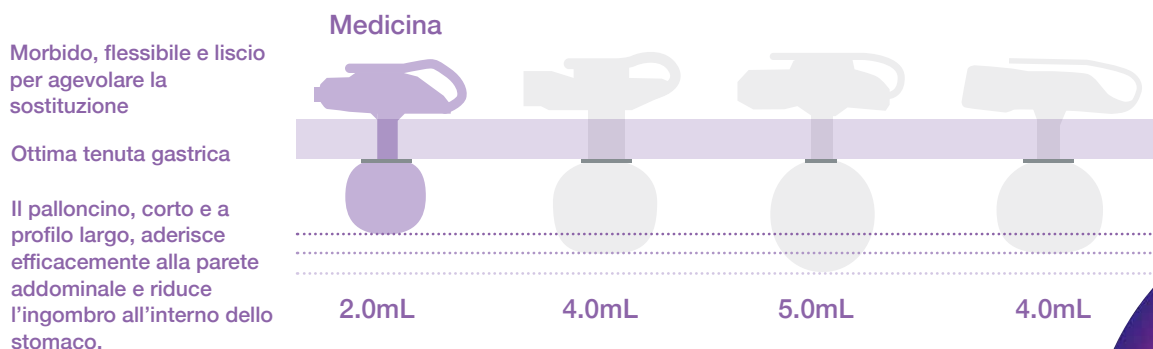

Caratteristiche principali del dispositivo

Il bottone per gastrostomia offre eccellenti caratteristiche per la sicurezza del paziente, il comfort e la facilità d'uso per il paziente o per l'operatore sanitario.

Il meccanismo di bloccaggio è dotato di una connessione a baionetta che consente una rotazione a 360°, prevenendo le rotture.

La posizione della valvola di gonfiaggio è inclinata di 14°. Un angolo di accesso maggiore consente un utilizzo più agevole.

Corpo liscio e affusolato per un inserimento e una rimozione più confortevoli.

Punta retratta per prevenire traumi una volta che il palloncino è gonfiato.

Indicazione del volume di riempimento e della misura del bottone marcata sulla linguetta.

Valvola antireflusso per prevenire la fuoriuscita del contenuto gastrico.

Palloncino a forma di mela che garantisce una buona tenuta e riduce le perdite dal tramite. La forma più corta e più larga occupa meno spazio nello stomaco.

GFitTM

**Kit Completo o Kit Base,
fare riferimento a pagina 7**



Kit G-Button Medicina

Il G-Button per gastrostomia è disponibile in Kit Completo o Kit Base a seconda delle preferenze del paziente e dell'operatore sanitario.




Kit completo

- Bottone per gastrostomia
- Set prolunga di nutrizione ENFit a due vie da 30,5 cm con connettore ad angolo retto con blocco di sicurezza
- Set prolunga di nutrizione ENFit a una via da 30,5 cm con connettore dritto con blocco di sicurezza
- Lubrificante
- Garze
- Introduuttore
- Siringa da 10 ml per il gonfiaggio del palloncino
- Siringa ENFit da 35 ml

Kit base

- Bottone per gastrostomia
- Lubrificante
- Garze
- Introduuttore
- Siringa da 10 ml per il gonfiaggio del palloncino

Fare riferimento a pagina 12 per le misure dei bottoni per gastrostomia e i codici prodotto.

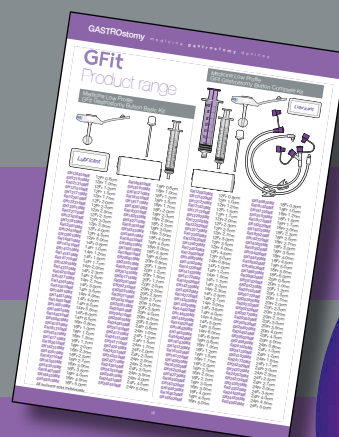

Set Prolunghe per bottone di gastrostomia

I set prolunghe della gamma Medicina sono resistenti alla piegatura e sono dotati di connettori ENFit conformi alla norma ISO 80369-3. Tutti i set sono dotati di un innovativo connettore rotante.

Il connettore rotante consente un facile collegamento e scollegamento. Anche le connessioni molto strette possono essere rilasciate facilmente e comodamente. Viene ruotata solo la connessione a baionetta. Questo evita la torsione dei set di estensione delle sonde di nutrizione, garantendo un comfort superiore per il paziente e una gestione più comoda per l'utilizzatore.

I connettori dei set di estensione sono realizzati in Tritan.

Il Tritan è una plastica leggera, robusta e durevole, resistente a soluzioni aggressive e ai farmaci. Le cricche da stress sono ampiamente evitate e i connettori risultano estremamente resistenti alla rottura durante l'utilizzo.


Tutti i set prolunghe Medicina sono sterili. Forniamo set con connettori a bolo e ad angolo retto, disponibili in varie lunghezze con vie ENFit singole o doppie.

È importante lavare il set prolunga dopo ogni utilizzo con acqua tiepida e sapone e risciacquare accuratamente. Il lavaggio e il risciacquo del set di estensione prevengono l'essiccazione della nutrizione e l'ostruzione del bottone o della valvola.

I set di estensione sono monouso e devono essere sostituiti ogni due settimane, o prima se risultano ostruiti o sporchi.



Fare riferimento a pagina 13 per le opzioni dei set di estensione per bottone e i codici prodotto.

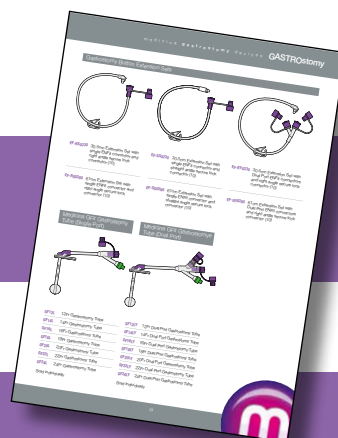

Accessori per Gastrostomia

Medicina Product Line include una gamma di accessori per completare e supportare i prodotti per gastrostomia, garantendo facilità d'uso e comfort per il paziente.

Tappo ACE

Gli stopper per stomia ACE sono tappi di silicone utilizzati per sigillare le stomie in varie parti del corpo. Essi possono essere utilizzati quando un dispositivo di gastrostomia non funziona e va sostituito. Gli stopper sigillano e mantengono la pervietà della stomia. Molti professionisti del settore sanitario li scelgono come back-up per i pazienti con stomia di nutrizione.



Cerotti ACElok

I cerotti per stomia ACElok sono stati specificamente progettati per essere posizionati sopra gli stopper per stomia per poterli fissare e proteggere.



Adattatore ENFit per gastrostomia

L'adattatore ENFit per gastrostomia consente di collegare una sonda per gastrostomia a un set prolunga o a una siringa ENFit.




Set prolunga

Il set prolunga bolo per gastrostomia aiuta il processo di somministrazione per gravità attraverso una sonda per gastrostomia. Esso viene utilizzato quando il flusso di somministrazione deve essere controllato. Il set prolunga è fornito con una siringa da 60 ml integrata ed è dotato di un sito a Y per i farmaci.



Fascia addominale

La fascia addominale è un dispositivo progettato per i pazienti che sono coscienti o che possono tirare accidentalmente la loro sonda per gastrostomia. Il dispositivo consente di mantenere la loro sonda per gastrostomia ordinata e sicura in una custodia appositamente realizzata. La fascia è disponibile in misure pediatriche e per adulti e può essere regolata per adattarsi.

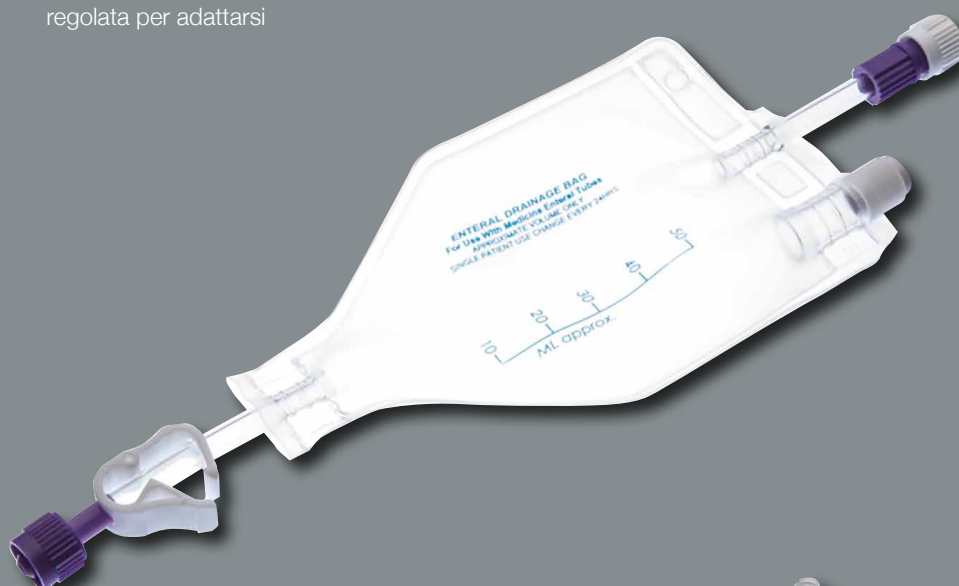

Sacche di drenaggio enterale

Le sacche di drenaggio ENFit sono disponibili per la raccolta dei fluidi di drenaggio gastrico. Le sacche di drenaggio sono dotate di un filtro antibatterico. Sono disponibili cinque misure.

Sistema di decompressione gastrica ENFit

Il sistema di decompressione gastrica ENFit rimuove i gas dallo stomaco del paziente durante la nutrizione, eliminando il dolore e il disagio associati alla ritenzione di liquidi e gas. Di conseguenza, i pazienti possono digerire la formula enterale al proprio ritmo e raggiungere i propri obiettivi calorici.



Set deflussori per nutrizione a gravità ENFit

Medicina Product Line include un range di set di deflussori per nutrizione a gravità ENFit che include Adattatore universale per bottiglie o Perforatore a croce ENFit.




Tutti i set di nutrizione per gravità includono una camera di gocciolamento, un sito a Y ENFit e una clamp a rullo.

I modelli MGS12L e MGS13L includono un adattatore a imbuto rimovibile. L'adattatore a imbuto rimovibile può diventare parte di un dispositivo di alimentazione per gastrostomia rendendolo compatibile ENFit. Una volta rimosso l'adattatore a imbuto, i modelli MGS12L e MGS13L sono dotati di un connettore femmina ENFit.

I modelli MGS10L e MGS11L sono dotati di un connettore femmina ENFit standard.

Tutti i Set deflussori per nutrizione a gravità ENFit includono una camera di gocciolamento, un sito a Y ENFit e una clamp a rullo.

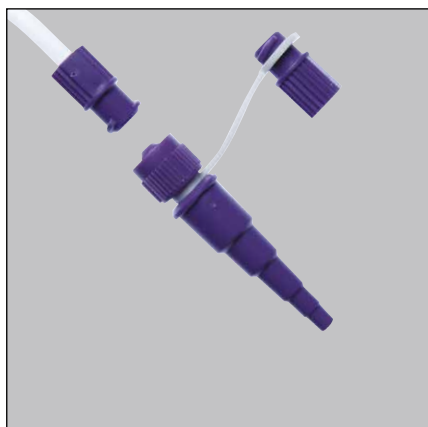


Esempio di adattatore a imbuto rimovibile dei modelli MGS12L e MGS13L.



GFitTM

Gamma prodotti


Medicina GFit Button - Kit base

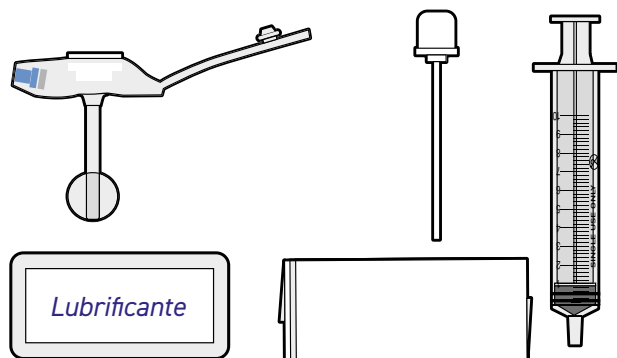

GH120810ME	12Fr 0.8cm	GH180810ME	18Fr 0.8cm
GH121010ME	12Fr 1.0cm	GH181010ME	18Fr 1.0cm
GH121210ME	12Fr 1.2cm	GH181210ME	18Fr 1.2cm
GH121510ME	12Fr 1.5cm	GH181510ME	18Fr 1.5cm
GH121710ME	12Fr 1.7cm	GH181710ME	18Fr 1.7cm
GH122010ME	12Fr 2.0cm	GH182010ME	18Fr 2.0cm
GH122310ME	12Fr 2.3cm	GH182310ME	18Fr 2.3cm
GH122510ME	12Fr 2.5cm	GH182510ME	18Fr 2.5cm
GH122710ME	12Fr 2.7cm	GH182710ME	18Fr 2.7cm
GH123010ME	12Fr 3.0cm	GH183010ME	18Fr 3.0cm
GH123510ME	12Fr 3.5cm	GH183510ME	18Fr 3.5cm
GH124010ME	12Fr 4.0cm	GH184010ME	18Fr 4.0cm
GH124510ME	12Fr 4.5cm	GH184510ME	18Fr 4.5cm
GH125010ME	12Fr 5.0cm	GH185010ME	18Fr 5.0cm
GH140810ME	14Fr 0.8cm	GH185510ME	18Fr 5.5cm
GH141010ME	14Fr 1.0cm	GH186010ME	18Fr 6.0cm
GH141210ME	14Fr 1.2cm	GH200810ME	20Fr 0.8cm
GH141510ME	14Fr 1.5cm	GH201010ME	20Fr 1.0cm
GH141710ME	14Fr 1.7cm	GH201210ME	20Fr 1.2cm
GH142010ME	14Fr 2.0cm	GH201510ME	20Fr 1.5cm
GH142310ME	14Fr 2.3cm	GH201710ME	20Fr 1.7cm
GH142510ME	14Fr 2.5cm	GH202010ME	20Fr 2.0cm
GH142710ME	14Fr 2.7cm	GH202310ME	20Fr 2.3cm
GH143010ME	14Fr 3.0cm	GH202510ME	20Fr 2.5cm
GH143510ME	14Fr 3.5cm	GH202710ME	20Fr 2.7cm
GH144010ME	14Fr 4.0cm	GH203010ME	20Fr 3.0cm
GH144510ME	14Fr 4.5cm	GH203510ME	20Fr 3.5cm
GH145010ME	14Fr 5.0cm	GH204010ME	20Fr 4.0cm
GH145510ME	14Fr 5.5cm	GH204510ME	20Fr 4.5cm
GH146010ME	14Fr 6.0cm	GH205010ME	20Fr 5.0cm
GH146510ME	14Fr 6.5cm	GH240810ME	24Fr 0.8cm
GH160810ME	16Fr 0.8cm	GH241010ME	24Fr 1.0cm
GH161010ME	16Fr 1.0cm	GH241210ME	24Fr 1.2cm
GH161210ME	16Fr 1.2cm	GH241510ME	24Fr 1.5cm
GH161510ME	16Fr 1.5cm	GH241710ME	24Fr 1.7cm
GH161710ME	16Fr 1.7cm	GH242010ME	24Fr 2.0cm
GH162010ME	16Fr 2.0cm	GH242310ME	24Fr 2.3cm
GH162310ME	16Fr 2.3cm	GH242510ME	24Fr 2.5cm
GH162510ME	16Fr 2.5cm	GH242710ME	24Fr 2.7cm
GH162710ME	16Fr 2.7cm	GH243010ME	24Fr 3.0cm
GH163010ME	16Fr 3.0cm	GH243510ME	24Fr 3.5cm
GH163510ME	16Fr 3.5cm	GH244010ME	24Fr 4.0cm
GH164010ME	16Fr 4.0cm	GH244510ME	24Fr 4.5cm
GH164510ME	16Fr 4.5cm	GH245010ME	24Fr 5.0cm
GH165010ME	16Fr 5.0cm		


Tutti i bottoni sono venduti singolarmente

Medicina GFit Button - Kit completo

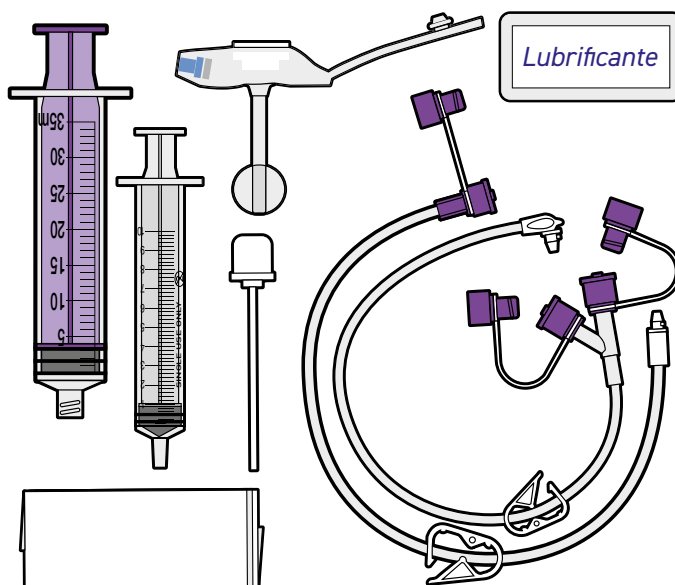


GH120820ME	12Fr 0.8cm	GH180820ME	18Fr 0.8cm
GH121020ME	12Fr 1.0cm	GH181020ME	18Fr 1.0cm
GH121220ME	12Fr 1.2cm	GH181220ME	18Fr 1.2cm
GH121520ME	12Fr 1.5cm	GH181520ME	18Fr 1.5cm
GH121720ME	12Fr 1.7cm	GH181720ME	18Fr 1.7cm
GH122020ME	12Fr 2.0cm	GH182020ME	18Fr 2.0cm
GH122320ME	12Fr 2.3cm	GH182320ME	18Fr 2.3cm
GH122520ME	12Fr 2.5cm	GH182520ME	18Fr 2.5cm
GH122720ME	12Fr 2.7cm	GH182720ME	18Fr 2.7cm
GH123020ME	12Fr 3.0cm	GH183020ME	18Fr 3.0cm
GH123520ME	12Fr 3.5cm	GH183520ME	18Fr 3.5cm
GH124020ME	12Fr 4.0cm	GH184020ME	18Fr 4.0cm
GH124520ME	12Fr 4.5cm	GH184520ME	18Fr 4.5cm
GH125020ME	12Fr 5.0cm	GH185020ME	18Fr 5.0cm
GH140820ME	14Fr 0.8cm	GH185520ME	18Fr 5.5cm
GH141020ME	14Fr 1.0cm	GH186020ME	18Fr 6.0cm
GH141220ME	14Fr 1.2cm	GH200820ME	20Fr 0.8cm
GH141520ME	14Fr 1.5cm	GH201020ME	20Fr 1.0cm
GH141720ME	14Fr 1.7cm	GH201220ME	20Fr 1.2cm
GH142020ME	14Fr 2.0cm	GH201520ME	20Fr 1.5cm
GH142320ME	14Fr 2.3cm	GH201720ME	20Fr 1.7cm
GH142520ME	14Fr 2.5cm	GH202020ME	20Fr 2.0cm
GH142720ME	14Fr 2.7cm	GH202320ME	20Fr 2.3cm
GH143020ME	14Fr 3.0cm	GH202520ME	20Fr 2.5cm
GH143520ME	14Fr 3.5cm	GH202720ME	20Fr 2.7cm
GH144020ME	14Fr 4.0cm	GH203020ME	20Fr 3.0cm
GH144520ME	14Fr 4.5cm	GH203520ME	20Fr 3.5cm
GH145020ME	14Fr 5.0cm	GH204020ME	20Fr 4.0cm
GH145520ME	14Fr 5.5cm	GH204520ME	20Fr 4.5cm
GH146020ME	14Fr 6.0cm	GH205020ME	20Fr 5.0cm
GH146520ME	14Fr 6.5cm	GH240820ME	24Fr 0.8cm
GH160820ME	16Fr 0.8cm	GH241020ME	24Fr 1.0cm
GH161020ME	16Fr 1.0cm	GH241220ME	24Fr 1.2cm
GH161220ME	16Fr 1.2cm	GH241520ME	24Fr 1.5cm
GH161520ME	16Fr 1.5cm	GH241720ME	24Fr 1.7cm
GH161720ME	16Fr 1.7cm	GH242020ME	24Fr 2.0cm
GH162020ME	16Fr 2.0cm	GH242320ME	24Fr 2.3cm
GH162320ME	16Fr 2.3cm	GH242520ME	24Fr 2.5cm
GH162520ME	16Fr 2.5cm	GH242720ME	24Fr 2.7cm
GH162720ME	16Fr 2.7cm	GH243020ME	24Fr 3.0cm
GH163020ME	16Fr 3.0cm	GH243520ME	24Fr 3.5cm
GH163520ME	16Fr 3.5cm	GH244020ME	24Fr 4.0cm
GH164020ME	16Fr 4.0cm	GH244520ME	24Fr 4.5cm
GH164520ME	16Fr 4.5cm	GH245020ME	24Fr 5.0cm
GH165020ME	16Fr 5.0cm		


Set prolunghe

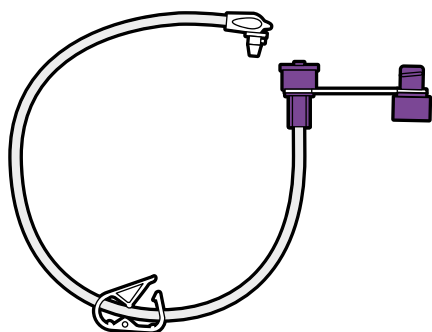

EF-RS0230 Set prolunga da 30,5 cm con connettore ENFit singolo e connettore di sicurezza ad angolo retto (10)

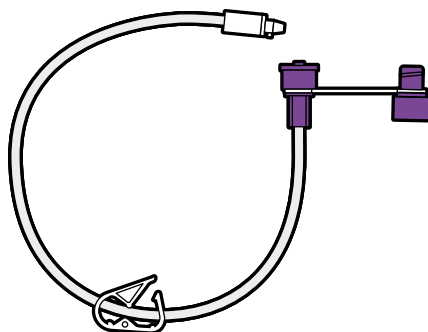

EF-SS0230 Set prolunga da 30,5 cm con singolo connettore ENFit e connettore ad angolo retto con blocco di sicurezza (10)

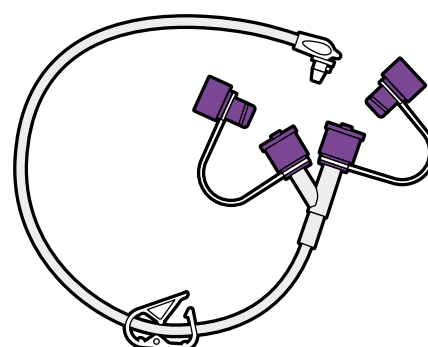


EF-RY0230 Set prolunga da 30,5 cm con connettori ENFit a doppia porta e connettore di sicurezza ad angolo retto (10)

EF-RS0260 Set prolunga da 61 cm con singolo connettore ENFit e connettore di sicurezza ad angolo retto (10)

EF-SS0260 Set prolunga da 61 cm con singolo connettore ENFit e connettore ad angolo retto con blocco di sicurezza (10)

EF-RY0260 Set prolunga da 61 cm con connettori ENFit a doppia porta e connettore di sicurezza ad angolo retto (10)


Medicina GFit Sonda per gastrostomia a una via

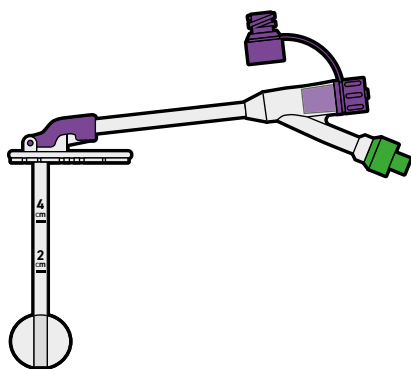

- GF12L** 12Fr Sonda per gastrostomia a una via
- GF14L** 14Fr Sonda per gastrostomia a una via
- GF16L** 16Fr Sonda per gastrostomia a una via
- GF18L** 18Fr Sonda per gastrostomia a una via
- GF20L** 20Fr Sonda per gastrostomia a una via
- GF22L** 22Fr Sonda per gastrostomia a una via
- GF24L** 24Fr Sonda per gastrostomia a una via

Venduto singolarmente

Medicina GFit Sonda per gastrostomia a due vie

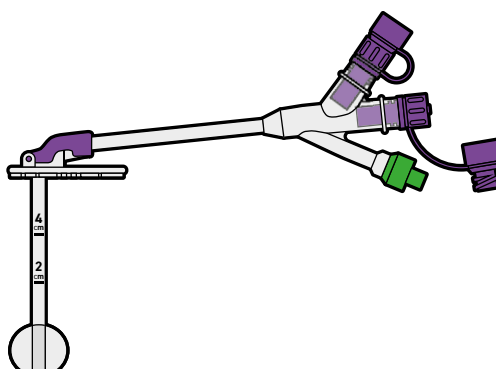

- GF12LY** 12Fr Sonda per gastrostomia a due vie
- GF14LY** 14Fr Sonda per gastrostomia a due vie
- GF16LY** 16Fr Sonda per gastrostomia a due vie
- GF18LY** 18Fr Sonda per gastrostomia a due vie
- GF20LY** 20Fr Sonda per gastrostomia a due vie
- GF22LY** 22Fr Sonda per gastrostomia a due vie
- GF24LY** 24Fr Sonda per gastrostomia a due vie


Venduto singolarmente




Stopper per stomia ACE



AP8/15 8FR - Lunghezza 15mm (1)

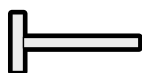


AP8/30 8FR - Lunghezza 30mm (1)

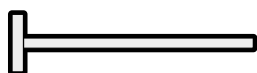


AP8/60 8FR - Lunghezza 60mm (1)



AP10/15 10FR - Lunghezza 15mm (1)

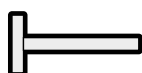


AP10/30 10FR - Lunghezza 30mm (1)

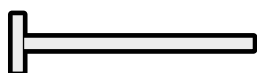


AP10/60 10FR - Lunghezza 60mm (1)



AP12/30 12FR - Lunghezza 30mm (1)

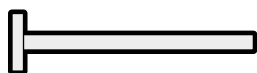

AP12/60 12FR - Lunghezza 60mm (1)

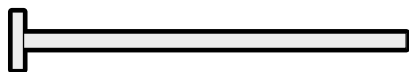

AP12/100 12FR - Lunghezza 100mm (1)



AP14/30 14FR - Lunghezza 30mm (1)




AP14/60 14FR - Lunghezza 60mm (1)




AP14/100 14FR - Lunghezza 100mm (1)

Set prolunga bolo per gastrostomia

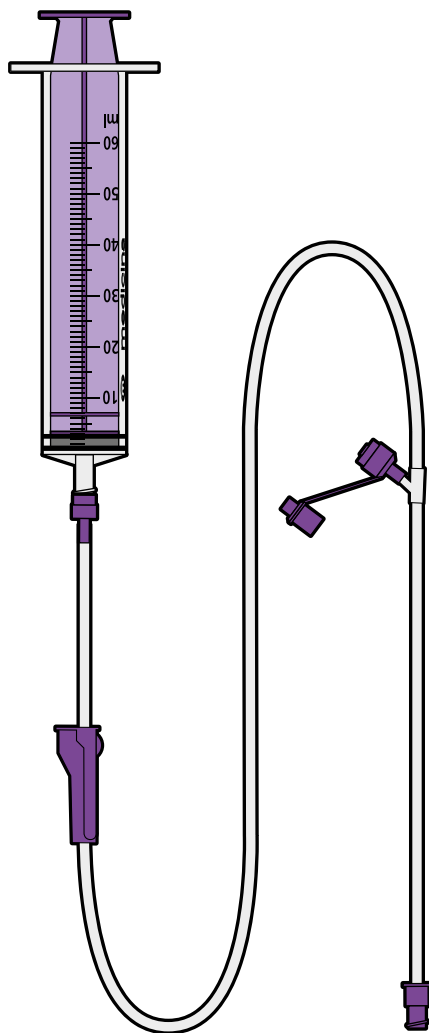


MGS02L Set prolunga bolo a gravità per gastrostomia (30)

Cerotto ACElok per stopper stomia

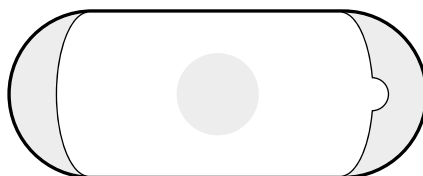


SD03 Cerotto ACElok (10)

Adattatori di transizione

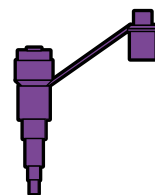

LK01 Adattatore di transizione per sonda ad imbuto a Siringa EnFit (50)


Fascia addominale per sonda per gastrostomia

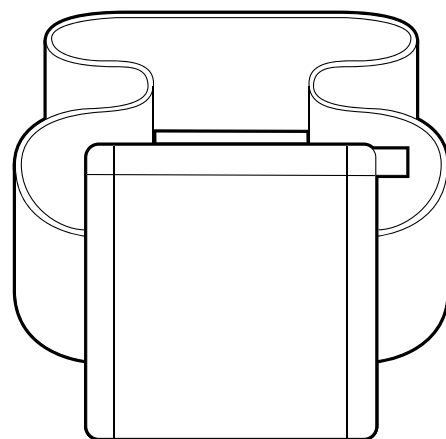

GT01 Fascia addominale per sonda per gastrostomia media (1) (75cm - 114cm)

GT02 Fascia addominale per sonda per gastrostomia larga (1) (117cm - 152.5cm)

Set deflussori per nutrizione a gravità ENFit

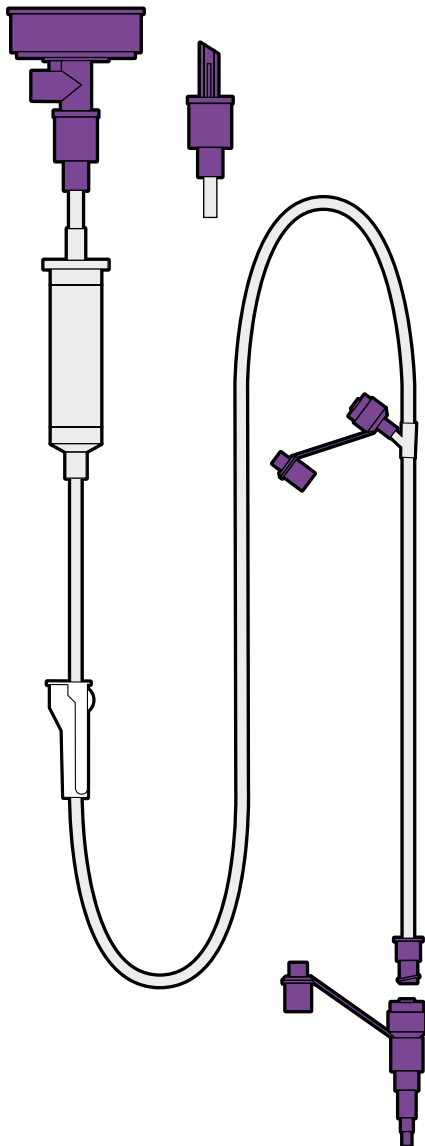


MGS10L Set deflussore a gravità ENFit con adattatore universale per bottiglie (30)

MGS11L Set deflussore a gravità ENFit con perforatore a croce ENFit (30)

MGS12L Set deflussore a gravità ENFit con adattatore universale per bottiglie e adattatore ad imbuto removibile (30)

MGS13L Set deflussore a gravità ENFit con perforatore a croce ENFit e adattatore ad imbuto removibile (30)

Sacche di drenaggio gastrico ENFit

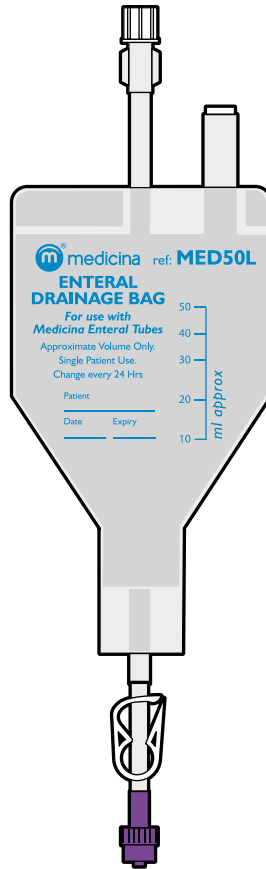

MED50L Sacca di drenaggio ENFit da 50ml (25)

MED100L Sacca di drenaggio ENFit da 100ml (25)

MED250L Sacca di drenaggio ENFit da 250ml (25)

MED500L Sacca di drenaggio ENFit da 500ml (25)

MED1000L Sacca di drenaggio ENFit da 1000ml (25)

MED51L Sacca di drenaggio ENFit da 50ml. Prolunga di 75cm inclusa (20)


MED101L Sacca di drenaggio ENFit da 100ml. Prolunga di 75cm inclusa (20)

MED251L Sacca di drenaggio ENFit da 250ml. Prolunga di 75cm inclusa (20)

MED501L Sacca di drenaggio ENFit da 500ml. Prolunga di 75cm inclusa (20)

MED1001L Sacca di drenaggio ENFit da 1000ml. Prolunga di 75cm inclusa (20)

Sistemi di decompressione gastrica ENFit

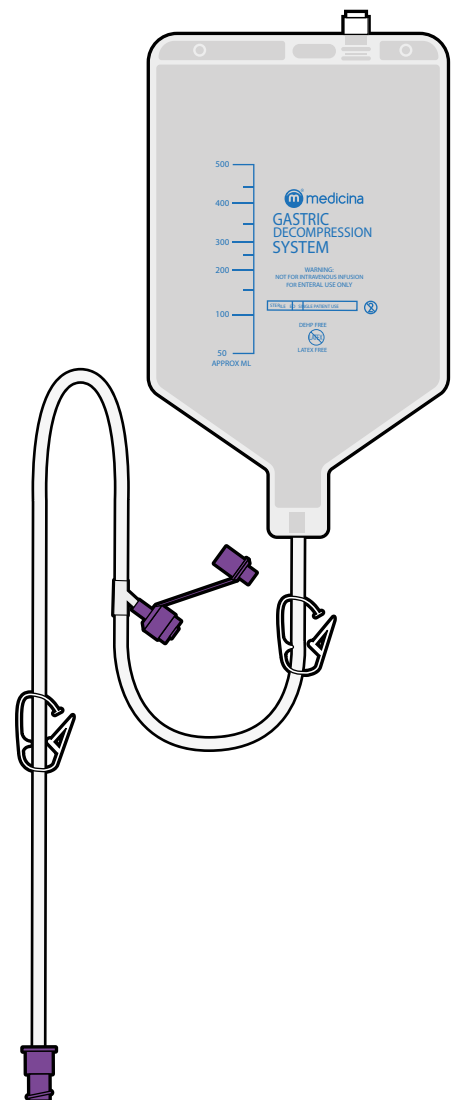

EV01L Sistema di decompressione pediatrico ENFit da 250ml (30)

EV02L Sistema di decompressione adulti ENFit da 500 ml (30)





Dispositivi per Gastrostomia

La nostra visione è fornire dispositivi per la nutrizione pratici, sicuri e confortevoli sia per adulti che per bambini.

I prodotti presentati in questo catalogo includono dispositivi medici per i quali HMC Premedical S.p.A. e Medicina Limited possono agire in qualità di Distributore, a seconda del dispositivo specifico.

Le informazioni regolatorie obbligatorie—come l'identificazione del Fabbrikante Legale, i dettagli relativi alla marcatura CE e/o UKCA e eventuali avvertenze o precauzioni—sono riportate sull'etichettatura del dispositivo e, quando applicabile, nelle Istruzioni per l'Uso (IFU), in conformità alle Leggi e ai Regolamenti vigenti.

Questo catalogo è destinato esclusivamente a scopi commerciali e informativi e non sostituisce né integra l'etichettatura o le IFU legalmente richieste che accompagnano ciascun dispositivo.



HMC Premedical S.p.A.
Via Bosco n. 1/3 - 41037
Mirandola (MO) Italy

 HMC Group

www.hmcgroup.it



Units 2-4, Rivington View Business Park,
Station Road, Blackrod, Bolton BL6 5BN, UK
Telephone: +44(0)1204 695050

 Medicina

www.medicina.co.uk

